

# IMMEDIATE



## Utilizzo previsto

Prodotto a uso esclusivo odontoiatrico per la ribasatura di protesi.

## Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Fresoni o abrasivi
2. Primer (adesivo acrilico)
3. Pennello
4. Spatola
5. Bisturi o disco abrasivo

## Istruzioni per l'uso



Per risultati costanti, agitare sempre il liquido prima di utilizzarlo.

1. Pulire e disinfettare la protesi.
2. Eliminare le sporgenze e i punti di pressione, se necessario, con un fresone o un abrasivo.
3. Rivestire la superficie della protesi da ribasare con Primer.
4. Proteggere le superfici da non ribasare.
5. Mescolare 2 parti circa di Immediate polvere con 1 parte di Immediate liquido. Miscelare accuratamente per circa un minuto. Lasciare gelificare per circa due minuti.
6. Distribuire la miscela nell'area della cresta, coprendo dalla cresta ai bordi periferici e attraverso la zona del post dam. (Quando si ribasa una protesi inferiore, tutte le superfici della protesi a contatto con i tessuti dovrebbe essere coperti).
7. Collocare la protesi nella bocca del paziente e fargli chiudere lentamente le mascelle in masticazione, portando i denti in occlusione centrica. Chiedere al paziente di muovere le guance come se succhiasse per far sì che i muscoli modellino i bordi.
8. Dopo tre minuti nella bocca del paziente, rimuovere la protesi e controllare la copertura e la modellatura dei bordi da parte di muscoli e frenuli. Aggiungere o togliere il materiale, se necessario.
9. Riposizionare la protesi nella bocca del paziente facendo mantenere un'occlusione rilassata per circa cinque minuti.
10. Rimuovere la protesi e rifinire secondo necessità con un bisturi o un disco abrasivo.

## Precauzioni di manipolazione

Contiene metil metacrilato

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

### Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.  
175 Messner Drive  
Wheeling, IL 60090 - USA



**MediMark® Europe** Sarl. 11 rue Emile Zola.  
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:

Ravelli S.p.A.  
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 37 R.6 2021-07

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)