

JET KIT



Utilizzo previsto

Prodotto a uso esclusivo odontoiatrico per la fabbricazione di ponti e corone provvisori a rapido indurimento destinati a rimanere in bocca per meno di 30 giorni.

Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Lubrificante siliconico
2. Polimerizzatore a pressione, opzionale
3. Glaze (sigillante acrilico), opzionale
4. Fresoni o abrasivi

Istruzioni per l'uso



Per risultati costanti, agitare sempre il liquido prima di utilizzarlo poiché il catalizzatore potrebbe essersi separato dal monomero.

1. Nell'impronta, riempire con Jet Kit il dente o i denti che sono stati estratti o preparati come segue: inumidire la superficie con il liquido e spruzzare la polvere dal tappo erogatore del flacone. Alternare liquido e polvere fino a riempire l'impronta. Per un risultato migliore, iniziare a terminare con il liquido.
2. Mentre si consente alla resina acrilica di raggiungere una consistenza pastosa, ricoprire i denti preparati e il tessuto circostante con il lubrificante siliconico per consentire una facile rimozione della resina acrilica dalle preparazioni e per proteggere i denti e i tessuti circostanti.
3. Posizionare l'impronta in bocca e tenerla in posizione per 3 minuti. Rimuovere e tagliare l'eccesso di resina acrilica. Non eliminare gli eccessi oltre il necessario.
4. Riposizionare l'impronta alternativamente dentro e fuori dalla bocca del paziente fino a quando il materiale raggiunge uno stato gommoso che non può essere distorto. **ATTENZIONE!** Non consentire al materiale di riscaldare in bocca!
5. Rimuovere l'impronta dalla bocca del paziente. Consentire ulteriori 10 minuti per la polimerizzazione, sia sul banco sia, per risultati migliori, in un polimerizzatore a pressione a 2 bar.
6. Rimuovere il provvisorio dall'impronta e verificarne l'adattamento.
7. Eliminare il materiale in eccesso con un fresone o un abrasivo. Rifinire fino all'ottenimento di una superficie liscia.
8. Lucidare con Glaze.
9. Pulire i denti del paziente da eventuali residui di lubrificante al silicone. Collocare il manufatto in bocca fissandolo con un idoneo cemento provvisorio.

Precauzioni di manipolazione

Contiene metil metacrilato

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Drive
Wheeling, IL 60090 - USA



MediMark® Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:

Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 14 R.0 2020-10

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it