

SELF CURING



Utilizzo previsto

Prodotto a uso esclusivo odontoiatrico/odontotecnico per la fabbricazione di protesi.

Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Isolante gesso-resina
2. Spatola in acciaio inox
3. Muffola
4. Polimerizzatore a pressione, opzionale

Istruzioni per l'uso



Per risultati costanti, agitare sempre il liquido prima di utilizzarlo.

1. Preparare stampo e controstampo della muffola come di consueto, utilizzando un isolante gesso-resina come mezzo di separazione tra le due parti. Dopo aver fatto bollire la cera, raffreddare la muffola a temperatura ambiente prima di continuare.
2. Utilizzando una spatola in acciaio inossidabile, mescolare approssimativamente 5 parti di polvere con 2 parti di liquido. Vibrare la miscela, se necessario, per rimuovere l'aria intrappolata. Versare la miscela nella muffola, anche lungo la periferia e i sottosquadri, fino a riempire la stessa leggermente in eccesso.
3. Porre la metà superiore della muffola in posizione solo con una leggera pressione della mano. Mantenere la muffola in questa posizione, senza applicare alcuna pressione, per 3 minuti. Non aprire la muffola in nessun momento dopo averla chiusa. Le chiusure di prova non sono necessarie.
4. Quindi, a piena pressione, chiudere completamente la muffola. Attendere altri 20 minuti per l'indurimento completo. Far polimerizzare al banco a temperatura ambiente o, per risultati migliori, polimerizzare in una pentola a pressione a 2 bar.
5. Rimuovere la protesi dalla muffola. Rifinire e lucidare come di consueto.

Precauzioni di manipolazione

Contiene metil metacrilato

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Drive
Wheeling, IL 60090 - USA



MediMark® Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:
Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 08 R.5 2021-07

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it