

# TEMPO



## Utilizzo previsto

Prodotto a esclusivo uso odontoiatrico per la ribasatura di protesi.

## Altri materiali / attrezzature necessarie

1. Spatola
2. Bisturi

## Istruzioni per l'uso



Per risultati costanti, agitare sempre il liquido prima di utilizzarlo.

### A. Ribasatura soffice

1. Pulire e disinfettare la protesi. Eliminare i punti di pressione.
2. Mescolare 2 parti circa di polvere con 1 parte di liquido miscelando accuratamente per 10 secondi.
3. Lasciare gelificare la miscela fino a quando non diventa viscosa, ma scorrevole. Versare nelle aree della protesi che richiedono un trattamento.
4. Far sciacquare la bocca al paziente. Chiedere al paziente di chiudere le mascelle in masticazione per allineare l'occlusione e mantenere questa posizione per 3 minuti. Il paziente può quindi parlare, leggere ad alta voce o masticare delicatamente per generare un'impronta funzionale. Il tempo totale di indurimento è di 20 minuti dalla miscelazione iniziale.
5. Rimuovere la protesi ribasata dalla bocca del paziente. Controllare che i bordi periferici siano adeguatamente coperti e che sia stato utilizzato sufficiente materiale per dare piena copertura all'area da trattare. Ulteriore Tempo può essere aggiunto in qualsiasi momento. Tagliare il materiale in eccesso con un bisturi.
6. Controllare periodicamente il paziente per verificare i progressi del trattamento. Per correggere i punti di pressione visibili attraverso la ribasatura sulla base della protesi, abraderli e aggiungere un altro strato di Tempo.

**NOTA:** Tempo può essere rimosso dalla base della protesi mediante raschiatura con un bisturi. Lo strato superficiale sottile può quindi essere dissolto con del monomero acrilico a base di metil metacrilato.

### B. Impronta funzionale

Per utilizzare Tempo unicamente come materiale per impronte funzionali, seguire i passaggi 1-5. Consentire al paziente di indossare la protesi ribasata con Tempo da 5 a 24 ore. Realizzare il modello in gesso il prima possibile dopo la rimozione dalla bocca del paziente dell'impronta funzionale ottenuta.

### Precauzioni di manipolazione

Contiene alcol etilico.

Pericolo: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde - Non fumare. Può provocare irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/ protezione degli occhi/protezione del viso. Conservare il materiale nel contenitore originale ben chiuso in posizione verticale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### Smaltimento

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

### Garanzia

Il produttore garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto solo presso distributori autorizzati. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato per lo scopo previsto, non utilizzato come indicato o non conservato nel contenitore originale.

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.



Lang Dental Mfg. Co., Inc.  
175 Messner Drive  
Wheeling, IL 60090 - USA



MediMark® Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.  
BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2. France



Importatore esclusivo per l'Italia:

Ravelli S.p.A.  
Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI)

LDDI 10 R.10 2020-10

Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito [www.ravellispa.it](http://www.ravellispa.it)