

# PULPDENT®

# embrace™ varnish

**5% fluoruro di sodio con CXP™**

**CXP™ = Calcio e fosfato rivestiti di xilitolo per un insuperabile rilascio di fluoro**

## EMBRACE™ Varnish

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EMBRACE™ Varnish è una vernice a base di resina che aderisce bene alle superfici dei denti e contiene xilitolo, fluoruro di sodio ed etanolo. Essa fornisce un rilascio di ioni fluoruro, calcio e fosfato in maniera sostenuta e per un periodo di 4 o più ore. Utilizzando una tecnica proprietaria, Pulpdent ha nano-rivestito sali di calcio e fosfato con xilitolo: come conseguenza, calcio, fosfato e fluoro sono biodisponibili. L'esposizione alla saliva scioglie lo xilitolo con rilascio di ioni calcio e fosfato e questi ioni reagiscono continuamente nella saliva con gli ioni di fluoruro per formare fluorapatite protettiva sui denti.

EMBRACE™ Varnish contiene il 5% di fluoruro di sodio, che è equivalente a 22.600 ppm (22,6 mg fluoruro/ml). Il materiale non si separa durante il trasporto o lo stoccaggio, garantendo un dosaggio prevedibile ed uniforme. Non è richiesta miscelazione. La vernice si diffonde in modo uniforme con un film sottile ed è liscia al contatto con la lingua. Non c'è granulosità, non si aggrega e scorre facilmente dalle superfici vestibolari alle linguali. EMBRACE Varnish è di colore chiaro e si asciuga rapidamente sui denti senza appiccicarsi alle guance.

### INDICAZIONI

EMBRACE™ Varnish tratta l'ipersensibilità rilasciando ioni calcio, fosfato e fluoruro che precipitano ed ocludono i tubuli dentinali e riempiono lesioni superficiali dello smalto non cariato.

### CONTROINDICAZIONI

Gengivite ulcerativa e stomatiti.

### PRECAUZIONI

Gli utilizzatori professionali devono utilizzare in maniera scrupolosa il prodotto per limitarne l'ingestione applicando solo la quantità necessaria di vernice per coprire le superfici dentali con un film sottile. I pazienti adulti devono astenersi dall'assumere integratori di fluoro per un periodo di 24 ore successive al trattamento, mentre i bambini devono astenersene per 2-3 giorni.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Sebbene la confezione monodose contenga solo 0,4 ml di vernice, non è necessario impiegarla tutta. Utilizzare solo la vernice necessaria per applicare uno strato sottile sulla zona del trattamento, tenendo presente l'età, il peso del paziente ed il numero di denti da trattare.

1. Identificare i denti che verranno trattati.
2. Asciugare i denti con una garza. E' preferibile che i denti siano puliti anche se la profilassi non è necessaria.
3. **Confezioni monouso:** aprire il sacchettino che contiene pennellino e bustina monouso di prodotto. Tirare lungo la linea di taglio della bustina per aprirla. Distribuire la vernice sul guanto o su un blocchetto d'impasto.
4. **Tubetto:** utilizzare il retro del tappo per bucare il sigillo sul tubetto. Schiacciare il tubetto dal fondo per un'erogazione accurata e controllata. Distribuire la vernice su un blocchetto d'impasto o in un pozzetto di miscelazione monouso per evitare infezioni incrociate.
5. EMBRACE Varnish è pronto all'uso e non richiede alcuna miscelazione, assicurando un consistente ed uniforme dosaggio.
6. Utilizzare il pennellino per applicare un sottile strato di vernice su tutte le superfici dei denti. Non è necessario usare tutta la vernice. Eliminare e il materiale non utilizzato.
7. È meglio se i pazienti si astengano dal mangiare cibi duri o bere liquidi caldi o alcool per 3-4 ore dopo il trattamento. E' consigliabile mangiare cibi morbidi per il resto della giornata. Informare i pazienti di non lavarsi i denti per almeno quattro ore.
8. EMBRACE Varnish può essere rimosso mediante spazzolatura e filo interdentale.

### AVVERTENZA

- EMBRACE Varnish può essere irritante per le vie respiratorie se inalato o per contatto con gli occhi o la pelle. Può creare sensibilizzazione a seguito di contatto prolungato e/o ripetuto. Prendere visione della scheda di sicurezza ulteriori informazioni.
- Gli utilizzatori devono indossare occhiali protettivi e guanti. Lavarsi le mani dopo l'uso. Rendere disponibile una fontana per lavaggi oculari di emergenza.
- EMBRACE Varnish non contiene soia o glutine. Contiene un estratto di pino trattato e non un estratto di pinoli. I pazienti con allergie devono consultare un medico.

**NOTA:** La confezione monodose di EMBRACE Varnish è destinata ad essere utilizzata una sola volta sul paziente eliminando il materia le avanzato. Un riutilizzo di una monodose di EMBRACE Varnish può provocare infezioni incrociate o l'applicazione di materiale con diminui te prestazioni.

### STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperatura ambiente fresco e asciutto a 5-25 °C. Evitare temperature estreme.